




antyalergetic covers

by **FIKI&MIKI**

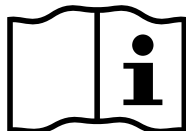

Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Wyrób należy użytkować zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji. W przypadku wątpliwości lub uzyskania dodatkowych informacji należy skonsultować się z lekarzem.

Instrukcja użytkowania

REF PK2


Poduszka Klin

Opis wyrobu:

Delikatnie uniesiona powyżej reszty ciała głowa. Stabilne podparcie główki, karku, szyi i pleców to komfortowa pozycja leżąca podczas snu i wypoczynku, która ułatwia swobodne oddychanie. Poduszka Klin umożliwia łatwe, stabilne i bezpieczne uzyskanie takiej pozycji. Jest dodatkowym elementem wspomagającym inne działania mające na celu ograniczenie możliwości ulewania lub zakrztuszenia się pokarmem podczas snu.

Poduszka Klin składa się z dwóch warstw:

1. Czterowarstwowego pokrowca (konstrukcja 4W) wykonanego z dzianiny 100% poliestrowej wykończonej protektorem SANITIZED T 25 25, puszystej włókniny poliestrowej i płaskiej włókniny polipropylenowej.
2. Wkładu wykonanego z pianki poliuretanowej.

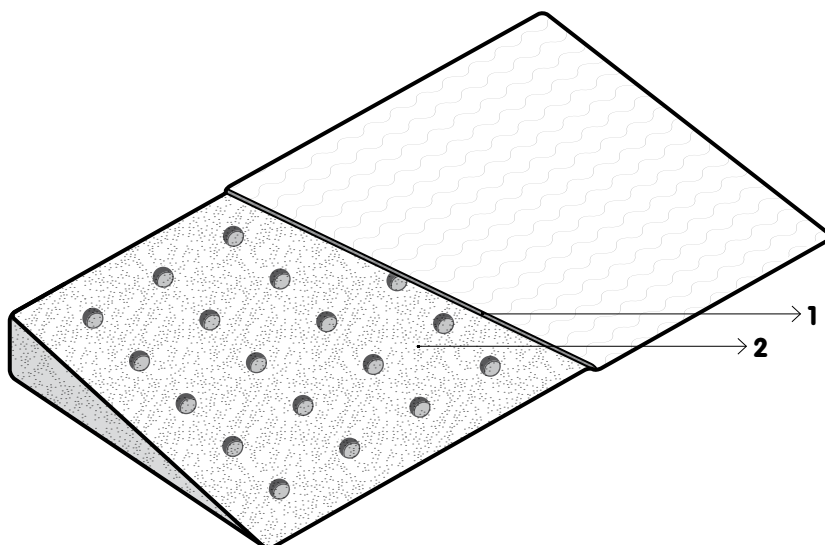

Właściwości pokrowca:

Pokrowiec można bardzo łatwo zdjąć i założyć. Przystosowany jest do prania w pralce w temperaturze 60°C, wirowania i suszenia w suszarkach bębnowych. Czworwarstwowy pokrowiec (konstrukcja 4W) wykonany z dzianiny 100% poliestrowej wykończony protektorem SANITIZED T 25 25, puszystej włókniny poliestrowej i płaskiej włókniny polipropylenowej.



Przewidziane zastosowanie wyrobu:

W normalnych warunkach użytkowania wyrób przeznaczony jest do stosowania u dzieci:

- w profilaktyce i wspomagającym leczeniu dzieci z alergią na roztocza kurzu domowego^{*)},
- w zapobieganiu wadom kręgosłupa szyjnego,
- w niestabilności kręgosłupa szyjnego,
- w stanach pourazowych w odcinku szyjnym kręgosłupa.

^{*)} Poduszka Klin może być stosowana podczas snu i wypoczynku, przez alergików oraz osoby zdrowe, jako jeden z elementów wielokierunkowego działania zmierzającego do ograniczenia ekspozycji na alergeny, a w szczególności w profilaktyce chorób alergicznych, a także w prewencji osób dotkniętych nadmierną reakcją na alergeny wziewne i kontaktowe.

Czy wiesz że:

Według najnowszych międzynarodowych wytycznych i standardów leczenia oraz profilaktyki chorób alergicznych zaleca się wielokierunkowe działania zmierzające do ograniczenia ekspozycji na alergeny. Wskazane jest:

- Pranie pościeli, poduszek, koców, pokrowców materaców, pluszowych zabawek w temperaturze min. 55°C.
- Poddawanie pościeli i zabawek pluszowych okresowemu działaniu niskich temperatur (zamrażanie).
- Stosowanie pościeli antyalergicznej.
- Stosowanie środków roztoczobójczych.
- Zrezygnowanie z dywanów.

Sposób użytkowania:

- Poduszka Klin zalecana jest do stosowania pod głowę na odcinku szyjnym, podczas snu i wypoczynku.
- Wyrób należy stosować zgodnie z przewidzianym zastosowaniem oraz ze wskazówkami i zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji.
- Wyrób jest nieinwazyjnym wyrobem medycznym, przeznaczonym do wielokrotnego użytkowania przez jedną osobę.
- Wyrób przeznaczony jest do nieprzerwanego stosowania nie dłużej niż 24 godziny, w przypadku konieczności dłuższego użytkowania należy przewietrzyć wyrób.
- W przypadku niemowląt, małych dzieci lub osób ze skórą wrażliwą, podatną na podrażnienia lub uczulenia, należy zastosować poszewkę wykonaną z dzianin lub tkanin bawełnianych.
- Przed pierwszym zastosowaniem wyrobu należy przeprowadzić procedurę prania pokrowca zgodnie z parametrami procesu konserwacji podanymi na wszywce.
- W przypadku zamoczenia lub zabrudzenia pokrowca należy niezwłocznie przeprowadzić standardową procedurę prania.
- Nie można przenosić poduszki wraz z dzieckiem/pacjentem.
- W przypadku uszkodzenia, deformacji wyrobu lub stwierdzenia niemożliwych do usunięcia zabrudzeń, należy wymienić wyrób lub jego zabrudzony komponent na nowy.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych związanych z użytkowaniem wyrobu należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania do stosowania:

- Nie można stosować wyrobu, w przypadku wystąpienia podrażnień, zmian skórnych lub innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórę, otwarte, niezabezpieczone opatrunkiem rany lub owrzodzenia.
- Nie stosować wyrobu, jeśli ten typ profilaktyki lub wspomaganie leczenia jest niezgodny ze wskazaniami medycznymi lub jest niewystarczający.
- Nie można stosować wyrobu u osób, u których występuje uczulenie na jakikolwiek składnik wyrobu.

Przechowywanie i konserwacja:

- Wyrób należy transportować w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczającym przed zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym i zamoczeniem.
- Wyrób należy przechowywać w suchym, pozbawionym wilgoci i nadmiernego kurzu pomieszczeniu, z daleka od działania promieni słonecznych.
- Przed pierwszym zastosowaniem wyrobu należy przeprowadzić procedurę prania pokrowca zgodnie z parametrami procesu konserwacji podanymi na wszywce.
- Pokrowiec należy poddawać okresowej procedurze prania. Zalecane jest co najmniej jedno pranie co 6 tygodni, przy założeniu, że będzie stosowany zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji.
- Pokrowiec przystosowany jest do prania w pralce w temperaturze 60°C i wirowania w max. 1000 obr./min.

Dostępne rozmiary:

Wysokość: od 5 do 21 cm.



Szerokość: od 25 do 200 cm.

Długość: od 25 do 220 cm.

Materacyk



Baer Jacek Czarnecki Damian Spółka Jawna
ul. Grunwaldzka 14, 62-020 Swarzędz, Polska
tel.: + 48 61 652 68 29, fax: + 48 61 652 68 30

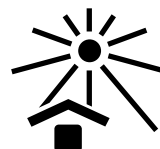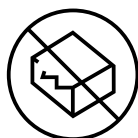

Numer i data wydania instrukcji: IU/FM/WM/REV.0/07.2014

www.materacyk.pl