



antyallergic covers



Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Wyrób należy użytkować zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji. W przypadku wątpliwości lub uzyskania dodatkowych informacji należy skonsultować się z lekarzem.

Instrukcja użytkowania

REF MS11

Materac Sensitive

Materac posiada Pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka nr Op-4860-63, ważną do 15.07.2019 r. oraz Świadectwo Jakości Zdrowotnej Państwowego Zakładu Higieny H-HŻ-6071-0317/14/C ważne do 27.08.2017 r.

Przewidziane zastosowanie wyrobu:



Materac zalecany jest do stosowania na wybranej lub całej powierzchni łóżka, podczas snu i wypoczynku. W normalnych warunkach użytkowania materac przeznaczony jest do wielokrotnego stosowania u dzieci:

- w zapobieganiu przeciążeniom kręgosłupa, związanych z wymuszoną pozycją ciała podczas spania,
- w zapobieganiu wadom postawy,
- wspomagająco w przeciwdziałaniu zaburzeń snu,
- w dysfunkcjach narządu ruchu w chorobach układu nerwowo-mięśniowego (np. porodowe uszkodzenie splotu ramiennego, mózgowie porażenie dziecięce).

Opis wyrobu:

Materac Sensitive to dwustronny materac, składający się z czterech warstw:

1. Czterowarstwowego pokrowca (konstrukcja 4W) wykonanego z dzianiny 100% poliestrowej wykończonej protektorem SANITIZED*), puszystej włókniny poliestrowej i płaskiej włókniny polipropylenowej.
2. Pianki lateksowej (20% lateks naturalny, 80% lateks syntetyczny).
3. Pianki poliuretanowej z wzdłużnymi i poprzecznymi kanałami wentylującymi.
4. Utwardzanej krawędzi z pianki poliuretanowej.

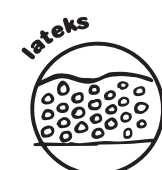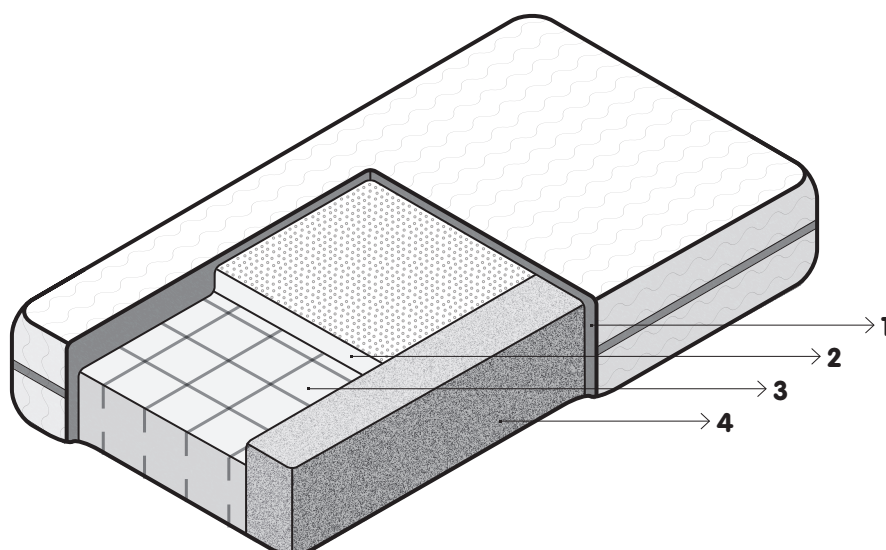

Właściwości pokrowca:

Pokrowiec można bardzo łatwo zdjąć i założyć. Przystosowany jest do prania w pralce w temperaturze 60°C, wirowania i suszenia w suszarkach bębnowych. Czworowarstwowy pokrowiec (konstrukcja 4W) wykonany jest z dzianiny 100% poliestrowej wykończonej protektorem SANITIZED[®], puszystej włókniny poliestrowej i płaskiej włókniny polipropylenowej. ^{*)} Protektor SANITIZED – substancją czynną jest chlorek dimetylotetradecylo[3-(trimetoksylilo)propylo]amonu.



Czy wiesz że:

W celu zwiększenia działania ograniczającego ekspozycję na alergeny roztoczy kurzu domowego, materac został wyposażony we wkład z pianki lateksowej, który można poddać okresowemu działaniu niskich temperatur (zamrażaniu).

Materac Sensitive został również wyposażony w pokrowiec, który w łatwy sposób można zdjąć i założyć ponownie. Przystosowany do prania w 60°C. Zalecane jest co najmniej jedno pranie co 6 tygodni, przy założeniu, że materac będzie stosowany wyłącznie z zalecaną ochronną nakładką higieniczną.

Sposób użytkowania:

- Wyrób należy stosować zgodnie z przewidzianym zastosowaniem oraz ze wskazówkami i zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji.
- Wyrób jest nieinwazyjnym wyrobem medycznym, przeznaczonym do wielokrotnego użytkowania przez jednego użytkownika.
- Wyrób przeznaczony jest do nieprzerwanego stosowania nie dłużej niż 12 godzin. W przypadku konieczności dłuższego użytkowania należy przewietrzyć wyrób.
- Materac użytkować zawsze zabezpieczony bawełnianym prześcieradłem i ochraniaczem – nakładką higieniczną lub podkładem. Nie stosować materaca w bezpośrednim kontakcie z ciałem użytkownika.
- Przed pierwszym zastosowaniem wyrobu należy przeprowadzić procedurę prania pokrowca zgodnie z parametrami procesu konserwacji podanymi na wszywce.
- W celu zabezpieczenia wyrobu przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem należy zawsze stosować ochraniacz – nakładkę higieniczną.
- W przypadku zamoczenia lub zabrudzenia pokrowca należy niezwłocznie przeprowadzić standardową procedurę prania.
- W przypadku materacy dwustronnych, aby zapewnić ich prawidłowe działanie oraz wydłużyć ich użyteczność, należy okresowo przewracać materac, co najmniej raz na trzy miesiące.
- Należy właściwie dopasować wyrób do rozmiaru łóżka/ramy łóżka. Nie dopuszczać do deformacji wyrobu poprzez jego zginanie, łamanie, rolowanie lub jakiegokolwiek inne działanie, które może doprowadzić do zmiany kształtu wyrobu.
- Nie przenosić materaca wraz z użytkownikiem.
- Nie można używać materaca zawilgoconego i/lub przemoczonego. Należy stosować jednorazowe nieprzemakalne podkłady, w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem lub przemoczeniem wyrobu.
- W przypadku gdy wyrób zostanie narażony na znaczne zmiany wilgotności i temperatury, wynikające np. z przenoszenia lub transportu wyrobu, przed użyciem należy odczekać tak długo, aż temperatura i wilgotność wyrobu ustabilizuje się i wyrówna się z temperaturą pokojową.

- W przypadku uszkodzenia, deformacji wyrobu lub stwierdzenia niemożliwych do usunięcia zabrudzeń, należy wymienić wyrób lub jego zabrudzony komponent na nowy.
- Materac przeznaczony jest do stosowania przez jedną osobę w warunkach domowych. Z powodów zdrowotnych i epidemiologicznych materac nie może być ponownie lub jednocześnie używany przez inne osoby. W razie zaistnienia konieczności użycia przez inne osoby, przed ponownym użyciem należy obowiązkowo poddać procesowi prania pokrowiec materaca wraz ze stosowanym prześcieradłem i/lub nakładką zgodnie z zaleceniami.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych związanych z użytkowaniem wyrobu lub w przypadku wątpliwości dotyczących odpowiedniego doboru materaca należy skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą.
- Wszystkie materiały opakowaniowe (np. folia, pudełka, plakaty, plastikowe końcówki) powinny być przed użyciem usunięte, aby nie pozostawały w zasięgu dzieci, gdyż mogłyby stać się niebezpieczną zabawką.

Przeciwwskazania do stosowania:

- Nie stosować wyrobu w przypadku wystąpienia podrażnień, zmian skórnych lub innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórę, otwarte, niezabezpieczone opatrunkiem rany lub owrzodzenia.
- Nie stosować wyrobu niezabezpieczonego bawełnianym prześcieradłem oraz ochroniaczem – nakładką higieniczną lub podkładem. Nie stosować wyrobu w bezpośrednim kontakcie ze skórą.
- Nie można użytkować wyrobu u osób, u których występuje uczulenie na jakikolwiek składnik wyrobu.

Przechowywanie i konserwacja:

- Materac należy transportować w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczającym przed zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym i zamoczeniem.
- Wyrób przechowywać i użytkować w suchym, pozbawionym wilgoci i nadmiernego kurzu pomieszczeniu, z daleka od działania promieni słonecznych oraz źródeł ciepła (kaloryferów, grzejników, piecyków ciepłych).
- Przed pierwszym zastosowaniem wyrobu należy przeprowadzić procedurę prania pokrowca zgodnie z parametrami procesu konserwacji podanymi na wszywce.
- Pokrowiec należy poddawać okresowej procedurze prania. Zalecane jest co najmniej jedno pranie co 6 tygodni, przy założeniu, że materac będzie stosowany wyłącznie z zalecaną ochronną nakładką higieniczną oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji.
- Pokrowiec przystosowany jest do prania w pralce w temperaturze 60°C i wirowania w max. 1000 obr./min.
- Opakowanie jednostkowe zapewnia szczelne i próżniowe zapakowanie wyrobu. Dlatego przed pierwszym użytkowaniem należy wyprać pokrowiec oraz wywietrzyć wkład materaca i odczekać, co najmniej 24 godziny przed użyciem wyrobu. Umożliwi to pozbycie się naturalnych zapachów poszczególnych komponentów wyrobu.
- Po każdorazowym wykonaniu procedury zamrożenia wkładu wykonanego z pianki lateksowej, należy dokładnie go wysuszyć. Wkład należy suszyć na sznurze (w pozycji wiszącej), co najmniej przez 48 godzin, w temperaturze w zakresie 20–23°C.

Dostępne rozmiary:

Wysokość: od 7 do 21 cm.


Szerokość: od 30 do 200 cm.

Długość: od 60 do 220 cm.

FIKI&MIKI[®]
materace dla Twojej rodziny



CE

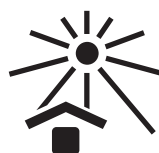

Numer i data wydania instrukcji: IU/FMN/WM/Rev.0/12.2016

www.materacyk.pl

Materacyk



Baer Jacek, Czarnecki Damian Spółka Jawna
ul. Grunwaldzka 14, 62-020 Swarzędz, Polska
tel.: + 48 61 652 68 29, fax: + 48 61 652 68 30