



Instrukcja użytkowania


Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Wyrób należy użytkować zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji. W przypadku wątpliwości lub uzyskania dodatkowych informacji należy skonsultować się z lekarzem.

Poduszka Klin+

Poduszka posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej Państwowego Zakładu Higieny H-HŻ-6071-0029/15/C ważne do 20.05.2018 r.

Przewidziane zastosowanie wyrobu:

Delikatnie uniesiona powyżej reszty ciała głowa dziecka, stabilne podparcie główki, szyi i pleców to prawidłowa pozycja leżąca podczas snu i wypoczynku, która ułatwia swobodne oddychanie. Poduszka Klin+ umożliwia łatwe, stabilne i bezpieczne uzyskanie takiej pozycji. Dodatkowym elementem wspomagającym tej poduszki jest ograniczenie możliwości ulewania lub zakrztuszenia się pokarmem u dziecka podczas snu, pomocna jest również u dzieci mających objawy refluksu żołądkowo-przełykowego. Poduszka Klin+ może być stosowana również w zapobieganiu wadom kręgosłupa szyjnego oraz w stanach pourazowych w odcinku szyjnym kręgosłupa.

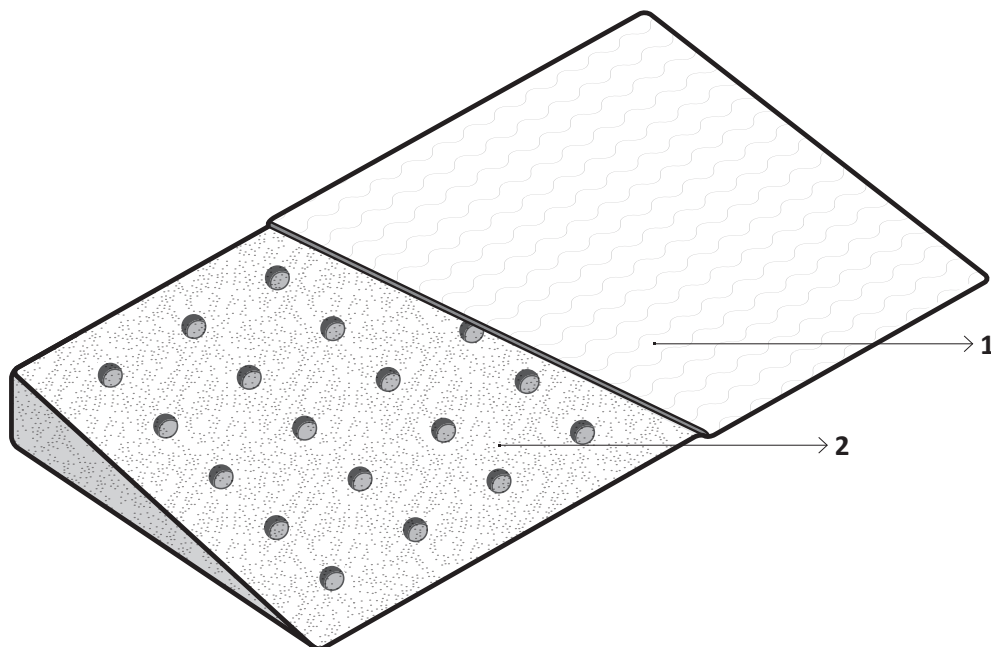

Opis wyrobu:

Poduszka Klin+ (Model: PMK2) składa się z dwóch warstw:

1. Czterowarstwowy pokrowca (konstrukcja 4W) wykonanego z dzianiny 100% poliestrowej wykończonej protektorem SANITIZED^{*)}, puszystej włókniny poliestrowej i płaskiej włókniny polipropylenowej.
2. Wkładu wykonanego z pianki poliuretanowej PUR.

^{*)}Protektor SANITIZED – substancją czynną jest chlorek dimetylotetradecylo[3-(trimetoksyliło)-propylo]amonu.

Sposób użytkowania:

- Wyrób należy stosować zgodnie z przewidzianym zastosowaniem oraz ze wskazówkami i zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji.
- Wyrób jest nieinwazyjnym wyrobem medycznym, przeznaczonym do wielokrotnego użytkowania przez jednego użytkownika.
- Poduszkę należy stosować pod głowę i w odcinku szyjnym kręgosłupa, podczas snu i wypoczynku.
- Wyrób przeznaczony jest do nieprzerwanego stosowania nie dłużej niż 12 godzin. W przypadku konieczności dłuższego użytkowania należy przewietrzyć wyrób.
- Poduszkę używać zawsze zabezpieczoną bawełnianym prześcieradłem oraz poszewką. Nie stosować poduszki w bezpośrednim kontakcie z ciałem użytkownika.
- Przed pierwszym zastosowaniem wyrobu należy przeprowadzić procedurę prania pokrowca zgodnie z parametrami procesu konserwacji podanymi na wszywce.
- Nie można używać wyrobu zawilgoconego i/lub przemoczonego. W przypadku zamoczenia lub zabrudzenia pokrowca należy niezwłocznie przeprowadzić standardową procedurę prania.
- Nie dopuszczać do deformacji wyrobu poprzez jego zginanie, łamanie, rolowanie lub jakiegokolwiek inne działanie, które może doprowadzić do zmiany kształtu wyrobu.
- Nie można przenosić poduszki wraz z użytkownikiem.
- W przypadku uszkodzenia, deformacji wyrobu lub stwierdzenia niemożliwych do usunięcia zabrudzeń, należy wymienić wyrób lub jego zabrudzony komponent na nowy.
- Poduszka przeznaczona jest do stosowania przez jedną osobę w warunkach domowych. Z powodów zdrowotnych i epidemiologicznych poduszka nie może być ponownie lub jednocześnie używana przez inne osoby. W razie zaistnienia konieczności użycia przez inne osoby, przed ponownym użyciem należy obowiązkowo poddać procesowi prania pokrowiec poduszki wraz ze stosowaną poszewką i prześcieradłem zgodnie z zaleceniami.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych związanych z użytkowaniem wyrobu należy skonsultować się z lekarzem.
- Wszystkie materiały opakowaniowe (np. folia, pudełka, plakaty, plastikowe końcówki) powinny być przed użyciem usunięte, aby nie pozostawały w zasięgu dzieci, gdyż mogłyby stać się niebezpieczną zabawką.

Przeciwwskazania do stosowania:

- Nie stosować wyrobu w przypadku wystąpienia podrażnień, zmian skórnych lub innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórę, otwarte, niezabezpieczone opatrunkiem rany lub owrzodzenia.
- Nie stosować wyrobu niezabezpieczonego bawełnianą poszewką. Nie stosować wyrobu w bezpośrednim kontakcie ze skórą.
- Nie można użytkować wyrobu u osób, u których występuje uczulenie na jakikolwiek składnik wyrobu.

Przechowywanie i konserwacja:

- Wyrób należy transportować w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczającym przed zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym i zamoczeniem.
- Wyrób przechowywać i użytkować w suchym, pozbawionym wilgoci i nadmiernego kurzu pomieszczeniu, z daleka od działania promieni słonecznych oraz źródeł ciepła (kaloryferów, grzejników, piecyków ciepłych).
- Przed pierwszym zastosowaniem wyrobu należy przeprowadzić procedurę prania pokrowca zgodnie z parametrami procesu konserwacji podanymi na wszywce.
- Pokrowiec należy poddawać okresowej procedurze prania. Zalecane jest co najmniej jedno pranie co 6 tygodni, przy założeniu, że będzie stosowany zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji.
- Pokrowiec przystosowany jest do prania w pralce w temperaturze 60°C i wirowania w max. 1000 obr./min.
- Opakowanie jednostkowe zapewnia szczelne i próżniowe zapakowanie wyrobu. Dlatego przed pierwszym użytkowaniem należy wyprać pokrowiec oraz wywietrzyć wkład poduszki i odczekać, co najmniej 24 godziny przed użyciem wyrobu. Umożliwi to pozbycie się naturalnych zapachów poszczególnych komponentów wyrobu.

Dostępne rozmiary:

- Wysokość: od 5 do 16 cm.
- Szerokość: od 25 do 90 cm.
- Długość: od 25 do 50 cm.

